

マイクロジッド® プレミアムワイプ

洗浄・除菌クロス

本品は医薬品及び医薬部外品ではありません。



除菌率
99.99%
※1


大判 (200mm×200mm) 120 枚入り

- ✓ 細菌・ウイルスを 99.99% 除菌※1
すべての菌を除去するものではありません。
- ✓ スマホ・タブレットにも使用可能。
- ✓ 厚手で液たっぷり。

※1 詳しくはうら面もしくは丸石製薬 HP (下記 URL または右の QR) をご覧ください。
<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/pickup/premiumwipe/>



厚手で目地が細かい!!

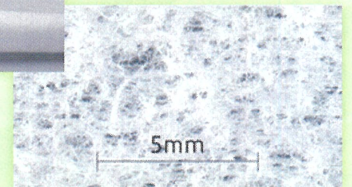

ご利用例

よく手が触れる場所の清拭・除菌にお使いください※2



テーブル・ベッド柵・ドアノブ・手すり・モニター・キーボード・スマートフォン・タブレット など

※2 人体・食器・食品の清拭には使用できません。 使用上の注意をよくご確認の上、ご使用ください。

製品仕様	【品名】	マイクロジッド® プレミアムワイプ	【サイズ】	200×200 (mm)	【枚数】	120 枚	【使用期限】	24 か月
	【用途】	環境表面の洗浄および除菌	【成分】	エタノール 12.6w/w%、イソプロパノール 17.4w/w%、界面活性剤、有機酸ほか				


■ 製品に関するお問い合わせ先

丸石製薬株式会社 学術情報部 0120-014-561 土日祝日・弊社指定休日を除く 9:00~17:00

マイクロジッド® プレミアムワイプ ご使用上の注意


⚠ 人体・食器・食品の清拭には使用しないでください。 詳細は下記の使用上の注意をご確認ください。

- ✓ ワイプを取り出したら、フタをしっかりと閉めてください。

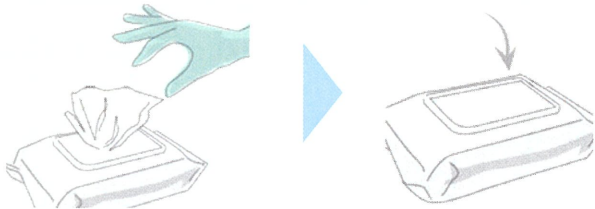

- ✓ 拭いた表面が十分濡れていることを確認し、自然に乾燥させてください。


二度拭きは不要です。

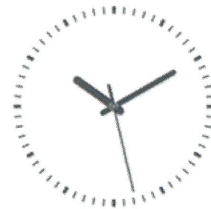

ワイプとしての基準(EN16615)をクリア


厚手で目地が細かい特殊なクロスに、独自処方の薬液を含ませた結果、欧州規格(European Norm)のEN16615:2015(4フィールドテスト)をクリアしています。

1

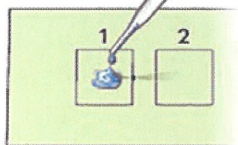

消毒面を模した素材に、微生物を置きます。

2

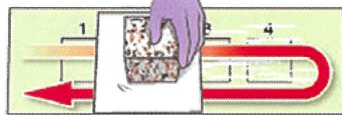

ワイプの上にブロックを置き、そのブロックを押すように動かします。

・拭き取り効果だけでなく、汚染を塗り広げていないかも評価可能です。

・ワイプ素材への液成分の吸着といった除菌作用への影響を含めた評価をすることが可能です。

試験結果

含まれている液について、標準試験法を用いて試験を行った結果です。(※3 >99.99%減少時間)

微生物名	試験法	タンパク負荷	>99.99%減少時間
■細菌			
黄色ブドウ球菌	EN13727	あり	15秒
エンテロコッカス ヒラエ	EN13727	あり	15秒
緑膿菌	EN13727	あり	15秒
MRSA	EN13727	あり	15秒
MDRA	EN13727	あり	15秒
CRE	EN13727	あり	15秒
■真菌			
カンジダ アルビカンス	EN13624	あり	1分※3
■抗酸菌			
結核菌の代替菌	EN14348	あり	5分

微生物名	試験法	タンパク負荷	>99.99%減少時間
■ウイルス			
新型コロナウイルス	EN14476	なし	15秒※3
インフルエンザウイルス A 型	EN14476	あり	15秒※3
ヒトHBVの代替ウイルス	EN14476	あり	15秒※3
HCVの代替ウイルス	DVV & RKI	あり	15秒※3
DVV&RKI 標準ウイルス	DVV & RKI	あり	15秒※3
マウスノロウイルス	EN14476	なし	30秒※3
ネコカリシウイルス	EN14476	なし	30秒※3
アデノウイルス	EN14476	あり	15分※3
パピローマウイルスの代替ウイルス	DVV & RKI	あり	15秒※3
ロタウイルス	EN14476	なし	15秒※3

⚠ 本品は医薬品および医薬部外品ではありません。⚠ 製品そのものの試験結果ではありません。

応急処置

- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
- なお、症状が重い場合は、眼科医の診察を受けてください。
- 体に異常が現れた時は、使用を中止してください。
- 内容物、容器は地域の規則に従って廃棄してください。

含浸液について

- 引火性の液体および蒸気
- 強い眼刺激
- 飲み込むと発がんのおそれ
- 飲み込むと生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- 吸入すると臓器(中枢神経系)の障害
- 長期にわたる、又は反復ばく露(吸入)による臓器(肝臓、血液への影響)の障害

使用上の注意

- ご使用前に丸石製薬のホームページで製品安全データシート(SDS)を参照してください。
- 人体には使用しないでください。
- 使用後はフタをしっかりと閉めてください。
- ワイプをトイレに流さないでください。
- 熱、直射日光、霜を避けてください。
- 容器は入れ替えず、室温で保存してください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけてください。
- 機器などに使用する場合は、目立たない部分で試してからお使いください。
- 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- 開封後は1ヶ月以内に使用してください。